

# SEMELLE BIONTECH®

LA SEMELLE  
BIOMÉCANIQUE  
PERSONNALISÉE  
QUI PRÉVIENT  
LA DOULEUR  
ARTICULAIRE

RÉF. 316

POINTURES : 36-


POIDS : 74 g\*



- Semelle de propreté amovible et antibactériennes
- S'adapte à la morphologie du pied par automoulage

## COMPOSITION

- 60% PU + 10% PA + 30% résine

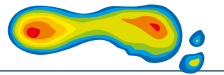

## LES +

- 5,3% en moins de vibration sur la région lombaire
- 17,2% en moins de vibration sur le genou
- 12,6% en moins de vibration sur la cheville
- 44% en plus de stabilité à la marche
- Semelle personnalisée
- Adaptation totale à l'ergonomie du pied
- Moins de douleurs articulaires
- Plus d'équilibre
- Moins de fatigue musculaire
- Un maximum de respirabilité
- Sec à 100%
- Traitement antibactérien

### COMMENT AUTO-MOULER BIONTECH® À VOS PIEDS?



En 3 étapes simples, les semelles anatomiques Biontech® seront ajustées de façon permanente à l'ergonomie de vos pieds.

**Étape 1 : Choisir les chaussures** dans laquelle vous souhaitez introduire les semelles Biontech®.

**Étape 2 : Chauffer la semelle.** Introduisez les semelles Biontech® parallèles -avec le logo tourné vers le haut- dans votre four à micro-ondes à une puissance de 500 W (température moyenne), pendant 40 secondes.

**Étape 3 : Ajuster la semelle.** Placez les semelles dans les chaussures et enfiler-les. Restez debout en exerçant une pression sur les semelles pendant 2 minutes. Il est recommandé de rester chaussé au moins 1 heure afin que votre empreinte reste fixée dans la semelle.

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

# S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : [info@s24.fr](mailto:info@s24.fr) - [www.s24.fr](http://www.s24.fr).

\*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 02.2015

